

# Kurzanleitung zum Aufnehmen von Bildern mit

Automatischer Modus, minimiert



Bildaufnahme

## Einzelbildaufnahme im automatischen Modus




*Wenn das Programm startet, liegt es im Hintergrund (minimiert).*

### Bild aufnehmen:



1. Auslöser an der Kamera *(in Einstellungen de/aktivierbar)*
2. USB-Tasters *(in Einstellungen de/aktivierbar)*

### Änderung der Kameraparameter für die Lichtverhältnisse

Die Parameter können nur geändert werden, wenn das Anwendungsfenster vergrößert wird.

-  1. Kameraeinstellung für Vollbild
-  2. Kameraeinstellung für Spalt
-  3. Kameraeinstellung für Fluoreszenz

### Automatischer Abgleich

-  1. Automatischer Kontrast an/aus *(in Einstellungen de/aktivierbar)*
-  2. Automatischer Weißabgleich an/aus *(in Einstellungen de/aktivierbar)*

### Grundeinstellungen:

Kamera gestartet  
Anwendungsfenster minimiert  
Kamerabild Original 1:1  
Parametersatz Vollbild