

# Kurzanleitung zum Aufnehmen von Bildern und Videos mit



Normaler Modus

Bildaufnahme

## Einzelbildaufnahme



Kamera starten



Bildverzeichnis wechseln

**Bild aufnehmen:**



1. Einzelbild speichern

2. Leertaste (in Einstellungen de/aktivierbar)

3. Auslöser an der Kamera (in Einstellungen de/aktivierbar)

4. USB-Tasters (in Einstellungen de/aktivierbar)

**Änderung der Kameraparameter für die Lichtverhältnisse**



1. Kameraeinstellung für Vollbild



2. Kameraeinstellung für Spalt



3. Kameraeinstellung für Fluoreszenz

**Automatischer Abgleich**



1. Autokontrast an/aus (in Einstellungen de/aktivierbar)



2. Automatischer Weißabgleich an/aus (in Einstellungen de/aktivierbar)

## Videoaufnahme



Kamera starten

*! Das Videoverzeichnis kann nur über die Einstellungen festgelegt werden !*

**Video aufnehmen:**



Videoaufzeichnung starten



Videoaufzeichnung stoppen

**Änderung der Kameraparameter für die Lichtverhältnisse**



1. Kameraeinstellung für Vollbild



2. Kameraeinstellung für Spalt



3. Kameraeinstellung für Fluoreszenz

**Automatischer Abgleich**



1. Autokontrast an/aus (in Einstellungen de/aktivierbar)



2. Automatischer Weißabgleich an/aus (in Einstellungen de/aktivierbar)

## Grundeinstellungen

Kamera nicht gestartet

Anwendungsfenster normal

Kamerabild Original 1:1

Parametersatz Vollbild

Einzelbildaufnahme

Videoaufnahme